



AQUISEL, s.l.u.

# FICHA TÉCNICA

Doc. – Sub Rev.

ESP-1800505-01 0

Fecha / Date

09/10/2019 Pág. 1/2

## DESCRIPCIÓN

AQUISFEK SAF 3,3 mL

## REF. COMERCIAL

**1800505**

Reactivo

Disolución fijadora SAF

### Finalidad prevista

Tubo con fijador para la recogida de muestras de heces y posterior concentración de las formas parasitarias presentes en las mismas, mediante filtración y centrifugación.

Lleva incorporado un sistema de filtros que mejoran la dispersión de la muestra para facilitar el filtrado y un fijador que permite la conservación de la morfología parasitaria.

Para diagnóstico "in vitro".

Características del método y procedimientos descritos en las hojas de acompañamiento **ICO-014-SAF y Fichas de datos seguridad del fijador**.

Contiene formol en su composición.



Incluir hoja  
ICO-014-SAF



### Características de los materiales y de dimensión del tubo

Tubo partes	Tubo donde va el aditivo		Polipropileno	
	Tubo centrifugado		Polipropileno	
	Cuchara toma muestra y doble filtro		Polipropileno	
Tubo dimensiones	Longitud:	127,5 mm	Diámetro máximo	17,2 mm
	Composición reactivo			
Tampón Acetato pH4 45 mM + FORMOL 1,5% + Tensioactivos y Estabilizantes				

### Condiciones de almacenamiento y conservación

El periodo de caducidad es de 24 meses desde su fabricación (ver etiqueta caja exterior y etiqueta tubo)

No exponer al sol de forma continuada y almacenar a temperatura entre 4 – 30°C.

El reactivo debe manipularse con precaución. Consultar ficha de seguridad.

### Presentación del producto

**100 uds caja**

Caja (cm): 23 x 23 x 17 (L x A x H)

Volumen : 0,009 m³

Peso aprox.: 1,2 Kg

### Recomendaciones para la eliminación:

Aplicar la legislación vigente en materia de eliminación de material con riesgo biológico.

### Referencias :

Producto sanitario para el diagnóstico InVitro (IVD) según Dir. 98/79/CE # R.D. 1662/2000

Sistema de Gestión de Calidad : UNE EN ISO 9001 – 13485





AQUISEL, s.l.u.

# FICHA TÉCNICA

Doc. – Sub Rev.

ESP-1800505-01

0

Fecha / Date

09/10/2019

Pág.

2/2

## ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN

Ej. Etiqueta 45x35 tubo ( 1 uds )



Ej. Etiqueta caja exterior 110x120 (100 uds)



CAMPO	SIGNIFICADO
REF	1800505
LOT	12: (año fabricación) 3456 (nº correlativo fabricación del año)
Fecha Caducidad	AAAA-mm (año – mes)
No.	Nº caja correlativo fabricación

### GS1-128 (EAN – 128) CODIGO BARRAS

Pendiente

### Símbolos

IVD	In Vitro Diagnostic
CE	Marcado CE conforme RD 1662/2000 producto sanitario IVD
Un solo uso	Un solo uso
Instrucciones de acompañamiento	Instrucciones de acompañamiento
Rango de temperatura recomendado de almacenamiento	Rango de temperatura recomendado de almacenamiento
Fabricante	Fabricante
Símbolo sustancias tóxicas Símbolo cancerígeno, mutágeno	Símbolo sustancias tóxicas Símbolo cancerígeno, mutágeno
H P	H: Indicación peligro (GHS / CLP) P: Consejo de prudencia (GHS/CLP)
Software	File: ESP-1800505-00-0-Et

Distribuido por:

**JP SELECTA S.A.U.**

Autovía A-2, Km 585,1 - 08630 Abrera (Barcelona) – España

Tel. ++ 34 93 770 0877 Fax ++34 93 770 2362

Contacto comercial: [tender@jpselecta.es](mailto:tender@jpselecta.es)

[www.grupo-selecta.com/es](http://www.grupo-selecta.com/es)

Soporte técnico: [ecatalan@quisel.es](mailto:ecatalan@quisel.es)

